



レンズを使用する前に必ず添付文書をよく読み、必要ときに読めるように保管してください。

2022年7月(第1版)

承認番号: 22200BZX00916A01

機械器具 72 視力補正用レンズ  
高度管理医療機器 再使用可能な視力補正用色付きコンタクトレンズ 32803000

# アイミーサプリームII

(ハードコンタクトレンズ)

## 【警告】

- コンタクトレンズ(以下、レンズ)の装用により、角膜潰瘍、角膜炎(感染性角膜炎を含む)、角膜浸潤、角膜びらん等の角膜上皮障害、角膜浮腫、結膜炎(巨大乳頭結膜炎を含む)、虹彩炎、角膜血管新生等が発症する可能性及び角膜内皮細胞の減少を早める可能性があります。レンズの装用による眼障害の中には、治療せずに放置すると失明につながるものがあります。
- 上記の眼障害を起こさないようにするためにも、レンズを使用する際は次のことを守ってください。
  - 装用時間を正しく守ること  
レンズの装用時間・日数には個人差があります。眼科医から指示された装用時間・日数を守ってください。
  - 取扱方法を守り正しく使用すること  
レンズやケア用品の取扱方法を誤ると眼障害につながる恐れがあります。レンズやケア用品(特にレンズケース)は清潔に保ち、正しい取扱方法で使用してください。
  - 定期検査を受けること  
自覚症状がなく調子よく装用していても眼やレンズにキズがついたり、眼障害が進行していることがあります。異常がなくとも眼科医に指示された定期検査を必ず受けてください。
  - 異常を感じたら直ちに眼科を受診すること  
レンズ装用前に眼ヤニや充血がないか、また装用後も異物感等がないか確認し、異常を感じたら眼科を受診してください。
  - 破損等の不具合があるレンズは絶対に使用しないこと  
装用前に、レンズに破損等の不具合がないか必ず確認してください。装用中にレンズの破損等による自覚症状が発生し、自覚症状が改善しない場合は眼科を受診してください。
  - 連続装用の場合、承諾書と管理手帳の内容を守ること(眼科医の許可なく連続装用することはできません)  
眼科医の指示に従い、連続装用の承諾書と管理手帳に記載された内容を守ってください。

## 【禁忌・禁止】

- 適用対象(患者): 次の人は使用しないこと  
前眼部の急性及び亜急性炎症  
眼感染症  
ぶどう膜炎  
角膜知覚低下  
レンズ装用に問題となる程度のドライアイ及び涙器疾患  
眼瞼異常  
レンズ装用に影響を与える程度のアレルギー疾患  
常時、乾燥した生活環境にいる人  
粉塵、薬品等が眼に入りやすい生活環境にいる人  
眼科医の指示に従うことができない人  
レンズを適切に使用できない人  
定期検査を受けられない人  
レンズ装用に必要衛生管理を行えない人
- 使用方法  
自分のレンズを他人に渡したり他人のレンズを使用しないこと

## 【形状・構造及び原理等】

### 1. レンズの組成

- 構成モノマー: ケイ素含有メタクリルアミド系化合物、フッ素含有メタクリレート系化合物、メチルメタクリレート
- 酸素透過係数:  $55.3 \times 10^{-11} (\text{cm}^2/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2/(\text{mL} \times \text{mmHg}))$
- 着色剤: アントラキノン系着色剤、アゾ系着色剤
- 紫外線吸収剤: ベンゾフェノン系紫外線吸収剤  
紫外線吸収率: 全てのレンズにおいて  
UV-A波: 吸収率51.3%以上  
UV-B波: 吸収率84.0%以上

### 2. 原理

コンタクトレンズに付加された頂点屈折力及びコンタクトレンズと角膜の間に存在する涙液により視力を補正する。

## 【使用目的又は効果】

視力補正

## 【使用方法等】

終日装用及び連続装用(最長装用可能日数7日間)

### <使用方法等に関連する使用上の注意>

初めて開封する場合は、レンズが飛び出さないように注意してケース内の透明フィルムを剥がしてください。ケースから取り出す際は手のひらで受けるようにしてください。レンズをつける場合は必ず、ハードコンタクトレンズ専用のケア用品でレンズ両面をこすり洗いし、水道水で十分にすすいでから装用してください。そのまま眼につけるともりや異物感の原因になることがあります(うるおい成分配合のコンタクトレンズ装着液を併用するとさらに効果的です)。

## 1. レンズ着脱

### (1) レンズ取扱いの注意事項

- 爪を短く切り、丸くなめらかにしてください。
- レンズを取扱う前に必ず手を洗浄してください。
- レンズを着脱するときは、爪を立てたり、指先が直接眼にふれないようにしてください。
- レンズの取扱いは、落としても見つけやすく、汚れにくい清潔な場所で行ってください。洗面台で取扱う場合は、排水口に栓をするか、流失防止シートを使用してください。
- レンズを落とした場合は、人差し指の先を水で濡らし、レンズに軽くふれ、真上に持ち上げるように拾い上げてください。

### 【注意】

レンズを強く押し付けたり、引きずったりすると、キズがつく恐れがあります。

### (2) レンズの取り出し方

装用前にレンズの左右を確認してください。ハードコンタクトレンズ専用のホルダーからレンズ面を親指と人差し指の腹を使って軽くつまみ、まっすぐに引き上げて取り出してください。

### (3) レンズのつけ方



- 利き手の人差し指の先にレンズの凹面を上にしてのせます。
- 鏡を見ながら、もう一方の手の親指と人差し指で眼を大きくあけます。
- レンズをゆっくりと眼に近づけ、黒目の上にそっとのせます。
- レンズを黒目にのせたら、眼をあげていた指をゆっくり離し、まばたきをゆっくりしてください。
- 左右の見え方を確認し、入れ違いがないかを確認してください。

### (4) レンズのはずし方




- レンズが黒目についていることを確認し、鏡を見ながら両眼をレンズより大きくあけます。
- レンズをはずす眼と反対側の手のひらを眼の下におき、はずれたレンズを受け止める受け皿にします。
- レンズをはずす眼と同じ側の手の人差し指で目尻を押さえ、眼をできるだけ大きくあけます。
- 眼を大きくあけたまま、人差し指で目尻を耳側やや上方へひっぱり、軽くまばたきをします。
- はずれて落ちるレンズを手のひらで受け止めます。

### 【レンズが一度ではずれない場合】

いったん指を離し、数回まばたきをし、もう一度最初からやり直してください。


### (5) レンズがずれたときの直し方

#### 【レンズが耳側にずれたとき】

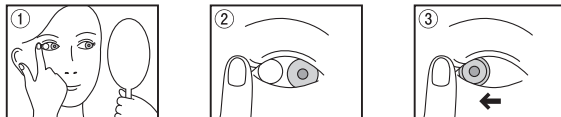

- 鏡を見てずれたレンズの位置を確認します。ずれた方向と逆の鼻側に鏡を持ち、眼を大きくあけて、顔は正面に向けたまま、横目で鏡を見ます。
- 人差し指の先で目尻を押さえ、レンズがそれ以上隠れないよう止めておきます。
- 顔は動かさず、鏡に映った眼を見ながら、黒目がレンズのところまでくるように鏡をゆっくり耳側まで動かすと、レンズは黒目に戻ります。  
※鼻側にずれたときは鏡と人差し指の位置を逆にし同じ要領で直してください。

#### 【レンズが上方にずれたとき】

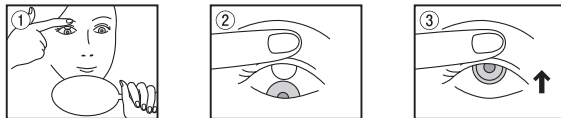

- 鏡を見てずれたレンズの位置を確認します。ずれた方向と逆の下方に鏡を持ち、眼を大きくあけて、顔は正面に向けたまま、下目で鏡を見ます。
- 人差し指の先で上まぶたの上からレンズの上方外側を押さえ、レンズがそれ以上隠れないよう止めておきます。

③顔は動かさず、鏡に映った眼を見ながら、黒目がレンズのところまでくるように鏡をゆっくり上方まで動かすと、レンズは黒目に戻ります。

※下方にずれたときは鏡と人差し指の位置を逆にし同じ要領で直してください。

**[注意]**

- ・レンズが眼の奥へ入ってしまうことは絶対にありませんので、あわてずにレンズがどこにあるかを確かめてください。
- ・ずれたレンズを指先で直接触れて戻すことを絶対にしないでください。角膜にキズがつき、レンズが破損する恐れがあります。
- ・まぶたの上からレンズを押さええないでください。押さえつけると白目にレンズが吸着してずれが直しくなくなったり、レンズが破損したりする恐れがあります。
- ・ご自身でずれを直せない場合は、眼科医にご相談ください。

**2. 装用スケジュール**

レンズの装用に慣れるまでのスケジュールには個人差があります。必ず眼科医の指示に従って、あなたにもっとも合ったスケジュールで慣らしてください。

(1) スケジュール例

<終日装用>

装用 日数	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目 以降
装用 時間	6時間	7時間	8時間	9時間	10時間	12時間	終日 装用

寝る前には必ずレンズをはずしてください。

<連続装用>

・上記終日装用の例を参考に、1週間以上の終日装用をした後、事前に眼科医による連続装用への安全性、適応性の検査を受けたうえで、連続装用へ移行してください。

・連続装用期間は最長7日間です。1週間に一度はレンズをはずして就寝してください。

(2) 装用を中断した場合

<終日装用>

・1ヵ月未満の中断：中断する前と同じ装用時間で装用を開始してください。

・1ヵ月以上の中断：眼科医の検査を受けてから、指示に従って装用を開始してください。

※眼障害のために装用を中断した場合は、必ず眼科医の指示に従い、再装用の許可が出てから装用してください。

<連続装用>

・1週間未満の中断：初日から連続装用が可能ですが、個人差があるため眼科医の指示を受けてください。

・1週間以上の中断：2～3日終日装用をした後、眼科医の指示を受けて連続装用へ移行してください。また、移行した翌日も眼科医の検査を受けてください。

・1ヵ月以上の中断：まず装用を開始する前に眼科医による眼とレンズの再検査を受け、その後1週間以上の終日装用を行い、再び眼科医の検査を受けたうえで、眼科医の指示に従って連続装用を開始してください。

**3. レンズケア**

注意事項として、以下のことを守ってください。

- (1) レンズケアの前に手指を洗浄してください。
- (2) 洗浄や保存には、ハードコンタクトレンズ専用のケア用品をご使用ください。
- (3) 開封前のレンズはドライ保存されていますが、開封後は洗浄保存液等に浸した状態でハードコンタクトレンズ専用のレンズケースに保管してください。
- (4) 装用前後は必ずレンズ両面を十分にこすり洗いしてください。
- (5) 装用前には水道水で十分にすすいでください。
- (6) レンズをはずした後は、必ずレンズケアを行ってください。
- (7) 毎回新しいケア用品を使用して洗浄や保存を行ってください。
- (8) 洗浄液や保存液は他の容器に入れ替えないでください。
- (9) レンズの汚れが気になる方は、眼科医にご相談ください。  
(研磨微粒子入りクリーナー等の併用)

詳細についてはそれぞれのケア用品の使用説明書、表示事項をよく読み、理解したうえで使用してください。

**4. レンズケースの管理方法**

- (1) レンズケースは定期的に新しいものと交換してください。
- (2) 使用後のレンズケースは中の保存液を捨て、よく洗った後、自然乾燥させてください。

**5. 定期検査**

- (1) レンズ装用開始日から1週間後、1ヵ月後、3ヵ月後、以降3ヵ月毎に、又は眼科医の指示に従って必ず定期検査を受けてください。
- (2) 連続装用をご希望の方は、検査の時期が異なりますので、眼科医にご相談ください。

**[使用上の注意]**

**1. 重要な基本的注意**

- (1) レンズを使用する前に必ず添付文書をよく読み、必要なときに読めるように保管してください。
- (2) アレルギー疾患を有する場合は、有害事象が発生する危険性が高まりますので眼科医にご相談ください。
- (3) 装用中に眼を強くこすらないでください。
- (4) 激しいスポーツをするときはご注意ください。
- (5) 運転中にレンズがはずれたり、ずれたりしたときは、運転を中止してください。
- (6) レンズに必要な以上の力を加えないでください。

(7) レンズを布(メガネ拭き等)や紙(ティッシュペーパー等)で拭かないでください。

**2. 不具合・有害事象**

以下の不具合や有害事象が発生する可能性があります。

(1) 不具合

レンズ：破損、キズ、変形、変色、汚れ、くもり、欠け、着色、白濁、反転、クラック、異物付着

容器：破損、汚れ、変形

透明フィルム：破損、接着不良

(2) 有害事象

角膜潰瘍、角膜膿瘍、角膜穿孔、角膜浸潤、角膜びらん、角膜炎、角膜上皮ステイニング等の角膜上皮障害、角膜浮腫、角膜血管新生、結膜炎、結膜下出血、虹彩炎、麦粒腫、マイボーム腺炎、霰粒腫、眼瞼下垂、調節性眼精疲労、ドライアイ、角膜内皮細胞の減少

**<装用時の症状と対処方法>**

- (1) 眼の調子や体調が悪い場合は、無理に装用しないでください。
- (2) レンズの装用中、次のような症状が発生した場合は対処方法をお試しください。症状が続く場合には速やかに眼科を受診してください。

症 状	対処方法
異物感、痛み、かゆみ、くもり、眼ヤニが多く出る、充血、視力不安定、見えにくい、眼の疲れ	・レンズを確認し、キズや破損または変形がある場合は、新しいレンズに交換する。 ・汚れがある場合は、レンズのこすり洗い、すすぎを行う。 ・装用時間が長すぎる場合は、装用時間を短縮する。 ・レンズの左右を確認し、レンズを正しくつけ直す。
乾燥感	・数回まばたきをして涙を多く出す。 ・眼科医から許可された点眼薬を点眼する。

**3. 高齢者への適用**

高齢者の使用で、自身での着脱、レンズケアが困難な場合は、眼科医にご相談のうえ、その指示に従ってください。

**4. 妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用**

(1) 薬剤の服用や点眼が必要な方、妊娠、出産された方は、レンズの装用に影響を及ぼすことがありますので、眼科医にご相談ください。

(2) 小児にレンズを使用させる場合は、保護者の方等による指導監督のもとに使用してください。

**5. その他の注意**

- (1) レンズ紛失時及び装用中止時の対応として、眼鏡を携帯し、併用してください。
- (2) 汚れが付着した場合は、洗浄剤等を用いてこすり洗いし、すすぎを行ってください。
- (3) 化粧はレンズをつけてから、化粧落としはレンズをはずしてから行ってください。
- (4) 化粧品、薬品、油類等がレンズにつかないようにしてください。
- (5) 装用中に使用する目薬は、防腐剤を含まない人工涙液型点眼薬をおすすめします。それ以外の目薬は眼科医の指示を受けて使用してください。
- (6) 水泳の際はレンズをはずしてください。
- (7) 未使用のレンズに異常が認められた場合は、レンズの購入先までご連絡ください。
- (8) 海外で使用する場合は、必要なケア用品を持参してください。
- (9) レンズを口の中に入れたり、なめたりしないでください。
- (10) 自動車、バイク等の運転や機械の操作は、レンズに慣れてから行ってください。
- (11) 連続装用は終日装用に比べ眼障害の発生率が高いため、特に注意が必要です。何らかの異常が見られた場合は、すぐに眼科を受診してください。

**[保管方法及び有効期間等]**

- (1) 直射日光及び高温、凍結を避け、室温で保管してください。
- (2) レンズを継続して装用可能かどうかは、定期検査時に眼科医にご相談ください。

**[保守・点検に係る事項]**

レンズケアにつきましては「<使用方法等に関連する使用上の注意>3. レンズケア」の項を参照してください。

**[製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等]**

<製造販売業者>

株式会社 トーメーコンタクトレンズ

052-588-2482

<販売業者>

アイミー株式会社

- (1) 症状に関するお問い合わせ  
処方された眼科・クリニックにご相談ください。
- (2) 製品に関するお問い合わせ  
アイミーコール(お客様相談窓口)  
TEL:0120-131-469 (フリーダイヤル)  
受付時間:9:00~17:00 (土日祝日を除く)  
アイミーホームページ: <https://aime.jp>