


薄型デザイン 終日装用ソフトコンタクトレンズ

アイミースーパーソフトⅡ

【販売名 アイミーソフトⅡ】
【承認番号 20500BZY00640A01】

プロダクトガイド

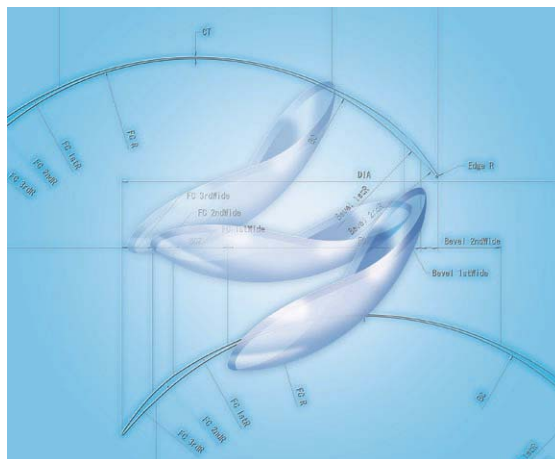

特長

- 中心厚0.035mm*の薄型デザインレンズ *球面度数-3.00Dの場合
- レースカット製法（切削研磨製法）によるレンズ周辺部分まで精密に加工されたデザイン
 - ◆フロント面のマルチステップ可変キャリアカーブにより、上眼瞼への負荷を軽減、自然な装用感
 - ◆エッジ部分のツインベベル加工で涙液交換性の向上
- 形状保持性が良く、汚れにくい低含水素材、取り扱いやすくケアしやすいレンズ

ソフトコンタクトレンズ分類	グループ I
含水率 (%)	38
中心厚 (mm)	0.035 (-3.00D)
酸素透過率 (cm (STP) O ₂ /cm ² · S · mmHg)	34.2 × 10 ⁻⁹
酸素透過係数 (cm ³ (STP) O ₂ /cm ² · S · mmHg)	12 × 10 ⁻¹¹
視感透過率	93 ± 2% 以上
構成モノマー	2-HEMA, EGDMA
着色剤	フタロシアン系着色剤
レンズカラー	ブルー
包装	1枚入り (バイアル瓶に封入)

製作範囲

BC(ベースカーブ)mm	Sph(球面度数)D	DIA(直径)mm
8.80	-0.50 ~ -6.00 (0.25step)	14.2
	-6.50 ~ -10.00 (0.50step)	

* 製品レンズに刻印はありません。

トライアルレンズ	BC 8.80mm/Sph -3.00D/DIA 14.2mm
	刻印入りレンズ2枚、プロダクトガイド、リーフレット

アイミー株式会社


処方フローチャート

トライアルレンズ

トライアルレンズ規格	
ベースカーブ (mm)	8.80
球面度数 (D)	-3.00
直径 (mm)	14.2

トライアルレンズ刻印

トライアルレンズには凸面から見たとき、図のような刻印が見えます。

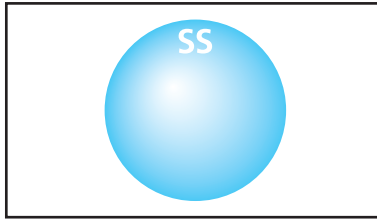

角膜頂点間距離補正表 (12mm)

追加球面度数 Sph(D)	補正後球面度数 Sph(D)
-3.75	-3.50
-4.00	-3.75
-4.25	-4.00
-4.50	-4.25
-4.75	-4.50
-5.00	-4.75
-5.25	-5.00
-5.50	-5.25
-5.75	-5.50
-6.00	-5.75
-6.25	-6.00
-6.50	-6.25
-6.75	-6.50
-7.00	-6.75
-7.25	-7.00
-7.50	-7.25
-7.75	-7.50
-8.00	-7.75
-8.25	-8.00
-8.50	-8.25
-8.75	-8.50
-9.00	-8.75
-9.25	-9.00
-9.50	-9.25
-9.75	-9.50
-10.00	-9.75
-10.50	-10.00
-11.00	-10.50
-11.50	-11.00

① 問診・前眼部検査

② 屈折検査・角膜曲率半径の測定

- 他覚的屈折検査
- 自覚的屈折検査
- 角膜曲率半径の測定

③ トライアルレンズの選択

■トライアルレンズ規格は BC 8.80mm/直径14.2mm/S-3.00Dです。

④ フィッティング検査

■トライアルレンズ装着後、涙の落ち着きを確認してからフィッティングを行ってください。

フィッティング	センタリング	動き	
		正面視	上方視
良好 (適応)	角膜がじゅうぶんに覆われ、センタリングが良い。	0.5~1.0mm	1.0~1.5mm
ステープorタイト (非適応)	中央で張り付き動かない。(球結膜への圧迫の確認)	0.5mm以下	1.0mm以下
フラットorルーズ (非適応)	偏位して安定位置が定まらない。(4時、8時方向のレンズエッジの浮き上がりの確認)	大きく動く	1.5mm以上ズレ

⑤ 追加矯正検査

- トライアルレンズの上からオートレフケラトメーターで測定した値を、追加矯正検査の目安にすることができます。
- 追加球面度数がS-3.75D以上は角膜頂点間距離補正を行い、トライアルレンズ度数に加えます。

⑥ 処方度数決定

レンズケア

このレンズは、化学処理による洗浄・消毒が必要です。レンズケアは、レンズの性能を維持し安全で快適な装用を続けるために欠くことができないものです。レンズの性能を充分発揮するためにも正しい取り扱い方法を指導してください。

*ケア用品の取り扱いに際しては、使用するケア用品の使用説明書および表示事項を必ず読むように指導してください。

定期検査

安全で快適な装用感を続けるために、調子よく装用していても定期検査を受けるように指導してください。

処方に関して注意していただきたいこと

- ◎コンタクトレンズは、目に直接のせて使用する高度管理医療機器です。取り扱い方法やケア用法を誤ると重篤な眼障害につながる場合があります。患者には正しい取り扱い方法と定期検査の必要性をご説明ください。
- ◎添付文書も併せてお読みいただきますようお願いいたします。
- ※バイアル瓶の開封時にアルミキャップで手指を切らないように充分注意してください。
- ※バイアル瓶のアルミキャップが途中で切れて開封できないときは、無理に開けようとしないようにご指導をお願いします。

<製造販売業者>

株式会社トーマーコンタクトレンズ

<販売業者>

アイミー株式会社

ご不明な点はアイミーコールまで、お問い合わせください。
お客様相談窓口
0120-131-469
受付時間/9:00~17:00(土日祝日を除く)

ホームページアドレス <https://aime.jp>

