

Soft Feel 1-day

ソフトフィール® ワンデー

販売名：ソフトフィール ワンデー
承認番号：30400BZ100013A02

ふわり潤いヴェール やさしいつけ心地



つけた瞬間のうるおい続く

生体適合性の高いうるおい成分「MPC ポリマー」を保存液に配合。レンズ表面にも保存液と接する面積を増やす独自の加工で、潤いをヴェールのようにまとわせます。

うるおいヴェール成分「MPC ポリマー」配合



紫外線から
瞳を守ります。




やさしいつけ心地、みずみずしくやわらかいレンズ素材

弾性率 **0.29 Mpa**^{※1} 含水率 **58%**

高含水 Etafilcon A はワンデーソフトコンタクトレンズのカテゴリでもっともやわらかい素材の種類で、慣れやすい優しいつけ心地です。酸素透過率^{※2}は終日装用に必要な酸素量も満たしています。^{※3}

※1 Innova Vision 社内データ ※2 Dk/t 値 $35 \times 10^{-9} (\text{cm}^2/\text{s}) \cdot (\text{mL O}_2) / (\text{mL} \times \text{mmHg})$ 、中心厚 0.08mm において

※3 B A Holden and G W Mertz, Critical oxygen levels to avoid corneal edema for daily and extended wear contact lenses, 1984

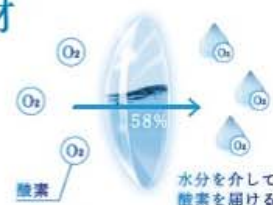

● 製品スペック・製作範囲

レンズ素材 (USAN)	Etafilcon A
ソフトコンタクトレンズ分類	グループIV (イオン性、含水率 50% 以上)
含水率	58 %
ベースカーブ	8.60 mm
直径	14.2 mm
中心厚	0.08 mm (球面度数 -3.00D において)
球面度数	-0.75 D ~ -6.00 D (0.25 D step) -6.50 D ~ -10.00 D (0.50 D step)
酸素透過係数 (Dk 値)	$28 \times 10^{-11} (\text{cm}^2/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2) / (\text{mL} \times \text{mmHg})$
紫外線吸収率	UV-A 波：吸収率 70% 以上 UV-B 波：吸収率 95% 以上
レンズカラー	ライトブルー
保存液の主成分	塩化ナトリウム、リン酸系緩衝剤、保湿成分 [MPC ポリマー]
レンズデザイン	スフェリカル (球面)
入数 パッケージサイズ	30 枚 / 1 箱 フラットタイプパッケージ [142×92×20mm]

● セット内容 (トライアルレンズ・販売用ストック)

	球面度数 (D)	箱数	入り数
トライアルレンズセット	-1.50 ~ -6.00 (0.25 D step)	20 箱	各 1 箱 (1 箱 10 枚入)
	-6.50		
販売用ストックセット	-1.00 ~ -6.00 (0.25 D step)	50 箱	各 2 箱 (1 箱 30 枚入)
	-6.50 ~ -8.00 (0.50 D step)		

※ トライアルセット、販売用セットはカスタマイズできます。収納ケースについては、担当営業へご確認ください。

① レンズの動きの観察

1) 正面視での動き

正面視時の瞬目後のレンズの動きを観察します。上下に 0.1～0.5mm の動きがあることを確認します。

2) 上方視での動き

上方視時の瞬目後のレンズが下にずれる様子を観察します。

レンズが角膜からずれて輪郭が露出するような場合は、ルーズフィッティングと判断してください。

3) プッシュアップテスト

正面視時に、指で下眼瞼の上からレンズを軽く押さえ、そのままレンズを上方に押し上げ、指を離します。その時にレンズが元の位置に戻る様子を観察します。

角膜頂点間距離補正表
(12mm)

追加 球面度数 Sph (D)	補正後 球面度数 Sph (D)
-3.75	-3.50
-4.00	-3.75
-4.25	-4.00
-4.50	-4.25
-4.75	-4.50
-5.00	-4.75
-5.25	-5.00
-5.50	-5.00
-5.75	-5.25
-6.00	-5.50
-6.25	-5.75
-6.50	-6.00
-6.75	-6.25
-7.00	-6.50
-7.25	-6.50
-7.50	-6.75
-7.75	-7.00
-8.00	-7.25
-8.25	-7.50
-8.50	-7.75
-8.75	-7.75
-9.00	-8.00
-9.25	-8.25
-9.50	-8.50
-9.75	-8.75
-10.00	-8.75
-10.50	-9.25
-11.00	-9.75
-11.50	-10.00

プッシュアップテスト

STEP
1



指で
下眼瞼の上から
レンズを押し上げる。

STEP
2



指を離して、
レンズが元の位置に
戻る様子を観察する。

- **良好：**レンズがスムーズに元の位置に戻る、レンズを上を持ち上げるときに抵抗がない。
- **不良：**抵抗があるためなかなか上にずらすことができない。

※フィッティング不良の場合は、本製品を処方しないでください。

② レンズ度数の決定

トライアルレンズの上から、検眼レンズを用いて追加矯正を行ってください。

追加矯正が-3.75D 以上の場合は角膜頂点間距離補正を行ってください。

③ 装用指導

1) 定期検査

安全で快適な装用を続けるために、調子良く装用していても、定期検査を受けるように指導してください。

2) 装用スケジュール

初めて装用する患者には下記のスケジュール表を参考に、各装用者に適した、無理のない装用スケジュールを指示してください。

装用時間 装用日数	6H	8H	10H	12H	14H
1日目	■				
2日目	■	■			
3日目	■	■	■		
4日目	■	■	■	■	
終日装用	■	■	■	■	■

- 寝る前には必ずレンズをはずすよう指導してください。

〈装用を一度中止した場合〉

- 1週間未満で中止した場合は、初日から終日装用が可能です。
- 1週間以上で中断した場合は、はじめて装用する場合と同じように、装用スケジュールに従って徐々に慣らすように指導してください。
- 1ヵ月以上で中断した場合は、眼科を受診してから装用を開始するよう指導してください。

3) 処方に際して注意していただきたいこと

レンズの品質には万全を期しておりますが、レンズに、破損、異物付着などの不具合がないか、事前にチェックしてください。万が一レンズに不具合があった場合、絶対に装用させず、また患者が装用しないように指導してください。レンズ装用前後あるいは装用中に目の痛みを訴えた場合、あるいは感じた場合は直ちにコンタクトレンズをはずさせ、眼科医の診察を受けるよう、患者に指導してください。

◎ コンタクトレンズは高度管理医療機器です。

コンタクトレンズは目に直接のせて使用する高度管理医療機器です。取扱い方法を誤ると重篤な眼障害につながる場合があります。患者には、正しい取り扱い方法と定期検査の必要性を説明してください。

◎ 添付文書もあわせてお読みいただきますよう、お願いします。

